



Univox[®] SmartLoop

Fleksibel og bærbar teleslynge for individuelle møter



- helping people

Bruksanvisning



Art nr 202090

Introduksjon

Takk for at du valgte Univox® SmartLoop bærbare teleslynge, den bærbare teleslyngeforsterkeren! Vi håper du blir fornøyd! SmartLoop tilbyr allsidig hjelp til hørapparatbrukere i utallige situasjoner og steder som krever kort eller lengre individuelle møter, eller møter med flere deltakere/talare. Enheten drives av et oppladbart litium-polymerbatteri og er alltid klar for umiddelbar bruk. Ingen installasjon kreves.

SmartLoop-pakken inneholder:

- Univox® SmartLoop
- DC-strømadapter med kabel
- Monteringsfot
- Informasjonsskilt med T-symbol
- Borrelåsfeste
- Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter og vedlikehold



Installatøren har ansvar for at produktene installeres slik at ingen risiko for brann kan oppstå. Apparatet eller strømforsyning må tildekkes.

Installer kun apparatet i en tørt og ventilert rom. Enheten må ikke åpnes da det kan bety risiko for støt. Bruk kun den medfølgende strømadapteret. Enheten krever normalt sett ingenting. Om enheten skulle bli skitten, tørke over den med og ren og fuktig klut. Ikke bruk ruk løsemiddel eller rengjøringsmiddel. Hånter produktene med forsiktighet for å forlenge levetiden.

Garanti

Produktene omfatter 2 års garanti. Utstyret skal installeres etter anvisningen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at produktgaranti ikke omfatter skader som oppstått gjennom inngrep i produktet, uforsiktighet, feil tilkobling/montering eller manglende vedlikehold.

Service

Om produktet ikke fungerer som det skal, lever det til leverandøren for feilsøking. Produktet som er kjøpt direkte av Bo Edin AB skal sendes med bedriftspakke eller tilsvarende til:

Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.


Miljø og gjenvinning



Kast alltid brukte batterier/produkter i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Hvis du gjør det, er du med på å bidra til et bedre miljø.

Bruksanvisning

1. Enheten kan legges, settet opp eller monteres under skrivebordet/resepsjonen. For optimal ytelse bør SmartLoop plasseres mellom hørapparatbruker og personer som snakker - rekkevidden er innenfor ca 1m.
2. Sett strømbryteren (6) til "ON" for å slå på på enheten. Strømindikatoren (5) lyser blått. Enheten kan drives med det innebygde batteriet eller medfølgende strømadapter. (8).
3. SmartLoop har innebygget elektretmikrofon, men kan også brukes med et eksternt headset eller en konferansemikrofon koblet til 3,5 mm-inngangen (2). Juster lydnivået med nivåkontrollen (4). Fire nivåinnstillinger er tilgjengelige innenfor Min-Max-området. Sett bryteren til "Min" og snakk normalt for å kontrollere volumet. Hodetelefonkontakten (3) er en direkte refleksjon av sløfens signalstrøm og lyd kvaliteten kan enkelt vurderes ved å koble til hodetelefoner. Juster nivået om nødvendig.

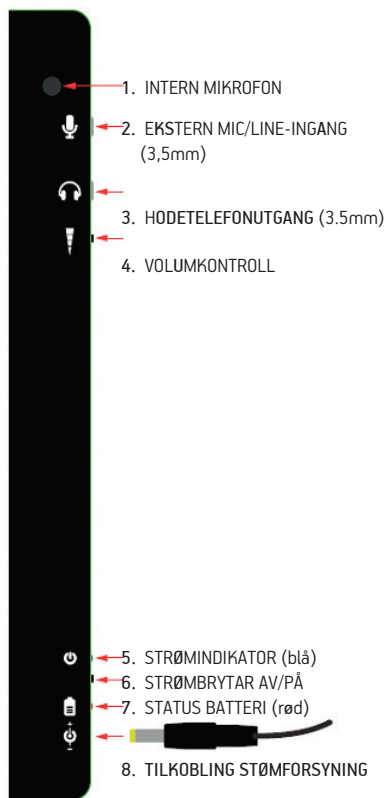

Lading av batteri

Enheten har et innebygd oppladbart Li-polymer batteri. Lad batteriet i minst 3 timer før du bruker den for første gang. For å lade, koble til det medfølgende strømadapteret til DC-inngangen (8). Fulladet batteri gir ca. 14 timers bruk.

Batteristatus-LED-en (7) indikerer konstant rødt når lading er nødvendig. Lad i minst 3 timer for å oppnå full kapasitet. For å sikre full batterikapasitet og optimal ytelse, bør enheten være koblet til AC-adapteren til enhver tid, hvis mulig.

Teknisk data

Strømforsyning	Innebygd litium-polymer-batteri Ekstern strømforsyning inkludert Energiforbruk	36mA@12V
Batteritid	Brukstid Ladetid	Opp till 14 timer 3 timer
Innganger	Innebygget mikrofon Ekstern mikrofon/linje Fantomspenning Mikrofon/linjefølsomhet Maks inngangsnivå	Makseffekt ved 70dB SPL@1m 3.5mm-ingång 12V 5mV-1.5Vrms, -45dBu 1.5Vrms (+5.7dBu)
Utganger	3,5mm hodetelefonutgang	
Utgangseffekt teleslynge	Feltstyrke (125ms rms) maks	400mA/m@1m
Forvrengning	avstand <1%	
Dobbeltvirkende AGC	Dynamisk område Innsvingstid: 2-500ms	> 50-70dB (+1.5dB) Utsvingstid: 0.5-20dB/s
LED-indikatorer	Strøm På/Av, Batteriladning	
Mål	(B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm	
Vekt	500g	
Monteringsalternativ	Aluminiumfot Borrelåsfeste	
Art nr	202090	

Tillbehør

Art nr

241602
242420
241280

Beskrivelse

M-2 Svanhalsmikrofon, for bord, 3,5mm
AVLM5 Mikrofon, för veggmontering, 3,5mm
CBL 410 PCC Konferensemikrofon, 3,5 mm



- helping people

Norsk distributør:

Cantec AS
Besøksadresse

Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR
Postboks 626, 1411 KOLBØTN

66 99 60 00

post@cantec.no
www.cantec.no

Produsent:

Bo Edin AB
Besøksadresse

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se