

Univox® Smart Loop

Fleksibel og bærbar teleslynge for individuelle møter



Egenskaper

- Kompakt og enkel å bruke
- Smidig - kun 15mm tykk
- Flere funksjoner; bærbar eller som hurtiginstallert skrankeslynge
- Nivåjustering for tilpassning til ulike hørapparater
- Høy effektivitet med klasse D-steg
- Dobbeltvirkende AGC for jevn og klar lyd
- Drives av innebyggt litium-polymer-batteri
- Integrrert elektretmikrofon
- Inngang for ekstern mikrofon

Bruksområder

Resepsjons- og infodisker
Besøksrom
Kontor
Små møterom
Venterom
Apotek
Bibliotek
Hjemmebesøk

Allsidig skrankeslynge for en-til-en-kommunikasjon

SmartLoop tilbyr allsidig assistanse til høreapparatbrukere i utallige situasjoner og steder som krever korte eller lengre individuelle møter eller møter med flere deltakere/foredragsholdere. Teleslyngen drives av et oppladbart litium-polymerbatteri og er alltid klar til umiddelbar bruk. Ingen installasjonsarbeid er nødvendig.

SmartLoop kan plasseres på en flat overflate, for eksempel en informasjonsskranke eller en pult, mellom to personer som vender mot hverandre. Enheten er designet for å ikke ta mye plass og er bare 15 mm tynn. For å snakke med høreapparatbrukeren, bruk enten den innebygde mikrofonen eller få en enda bedre funksjon ved å bruke et hodesett eller myggmikrofon som kobles til 3,5 mm-inngangen. Med en surround-opptaksmikrofon plassert midt på bordet kan SmartLoop også brukes i møter med flere deltakere.


SmartLoop kan brukes som en tradisjonell over-the-counter loop (CTC) ved at den monteres på den medfølgende foten. SmartLoop kommer da i stående stilling og blir lett å få øye på, samtidig som den fungerer som et informasjonsskilt for teleslyngen.

Det er også mulig å montere SmartLoop på undersiden av informasjonsskranken, resepsjonen eller pulten. Installasjonen er enklere enn for en tradisjonell over-the-counter sløyfe, da SmartLoops sin hodetelefonsløyfekabel og sløyfeforsterker er innebygd i samme enhet. Fest enheten med de medfølgende borrelåsstroppene og koble til en mikrofon, for eksempel Univox AVLM5 veggmikrofon, Univox M-2 svanehalsmikrofon eller AKG CBL 410 konferansemikrofon.

Univox® SmartLoop

Tekniske data

Strømforsyning	Innebygget litium-polymerbatteri Ekstern strømforsyning medfølger	
Batteritid	Energiforbruk	36mA@12V
	Brukstid på batteri	Opp till 14 tim
	Laddetid	3 timer
Inngang	Inbygget mikrofon	Maks effekt ved 70dB SPL@1m
	Extern mikrofon/linje	3.5mm-inngang
	Fantomspenning	12V
	Mik/Linjefølsomhet	5mV-1.5Vrms, -45dBu 1.5Vrms (+5.7dBu)
	Maks inngangsnivå	
Utgang	3,5mm-hodetelefonutgang	
Utgangseffekt teleslynge	Feltstyrke (125ms rms) max 400mA/m@1m avstand	
Forvrengning	<1%	
Dobbelvirkende AGC	Dynamisk område >	50-70dB (+1.5dB)
	Innsvingetid: 2-500ms	Utsvingetid: 0.5-20dB/s
LED-indikasjoner	Strøm På/Av	
	Batterilading	
	Mål	(B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm
Vekt	500g	
Monteringsalternativ	Aluminiumfot Borrelåsfeste	
Art.nr.	202090	

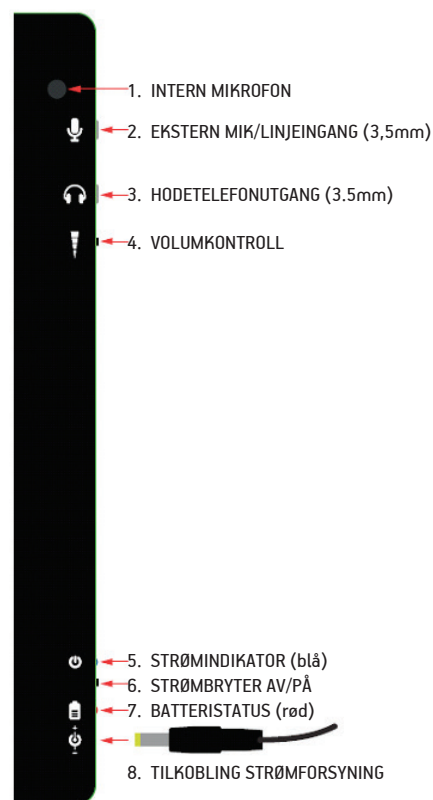

Tilbehør

Art nr	Beskrivelse
241602	M-2 Svanehalsmikrofon, for bord, 3,5mm
242420	AVLM5 Mikrofon, för veggmontering, 3,5mm
241280	CBL 410 PCC Konferansemikrofon, 3,5 mm



Univox AVLM5



Univox M-2



AKG CBL 410 PCC

Broschy, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se



Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 18175 LIDINGÖ
Förrådsvägen 2 B, 18141 LIDINGÖ

Tel 08-7671818
Fax 08-7671820

E-mail info@edin.se
Internet edin.se • [hörbutiken.se](http://horbutiken.se)

 **univox**
BY EDIN