


Brukerhåndbok

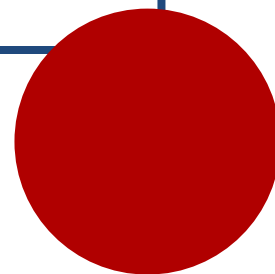

Victor Reader Stratus⁴



Victor Reader Stratus⁴ Brukerhåndbok

Komme i gang med Victor Reader Stratus4

Velkommen til Victor Reader Stratus⁴, din nye, digitale lydbokspiller. Første gang du bruker den bør du koble spilleren til strømmettet.

For å koble til strømmettet kobler du den ene enden av strømkabel adapteren til strømuttaket på spilleren. Det finner du ved det høyre hjørnet bak på spilleren. Sett den andre enden av strømkabelen i veggkontakten. Første gang du tar spilleren i bruk, eller etter at du har byttet batterier, eller etter at spilleren ikke har vært i bruk for en lengre periode, anbefaler vi at du lar spilleren stå koblet til strømmettet over natten, for å sikre at batteriene er fullstendig ladet.

På/Av tasten kan lyse enten rødt eller grønt. Tasten blinker rødt når spilleren er slått av og er koblet til strømmettet. Dette angir at batteriene lades. Når det slutter å blinke er batteriet fullt ladet. Når spilleren er slått på lyser tasten grønt, uavhengig av om spilleren er koblet til strømmettet eller ikke. Under normale omstendigheter tar det inntil 4 timer å foreta en full ladning, som vil gi inntil 10 timer lesetid for de fleste Daisy bøker.

Legg merke til at du kan bruke Victor Reader mens batteriene lades.

Pakken inneholder følgende: En Victor Reader Stratus⁴, Tastaturdeksel (tilleggsutstyr), strømkabel, en plastpose med norsk og engelsk dokumentasjon og denne CD'en. CD'en inneholder en kort Komme i Gang beskrivelse, som etterfølges av Brukerhåndboken.

Du kan når som helst ta en pause i lesingen – og fortsette – ved å trykke på **Spill/Stopp** tasten som er plassert midt mellom **Hurtig Frem** og **Tilbakespol** tastene.

Vi begynner nå med Komme-i-gang økten.

Plasser spilleren foran deg med bærehåndtaket til venstre. Over håndtaket, i venstre hjørne finner du en innebygget høyttaler.

Midt på spilleren, lengst bak, finner du 3 par med opp-og-ned taster. Fra venstre mot høyre regulerer disse parene **Toneleie**, **Volum** og **Hastighet**.

Nedenfor Toneleie, Volum og Hastighet kontrollene, omtrent midt på spilleren finner du Navigasjons tastene, som peker **Opp**, **Ned**, **Fram (Høyre)** og **Tilbake (Venstre)**. Disse gir deg mulighet til å flytte gjennom en bokstruktur. Midt mellom disse fire Navigasjonstastene finner du **Informasjons** tasten. Denne gir deg informasjon om gjeldende leseposisjon i boken, og generell informasjon om boken.

Til venstre for de fire Navigasjonstastene, omtrent midt på spilleren finnes tre andre taster som står etter hverandre. Den øverste tasten er **Bokhulle** tasten. Du kan bruke Bokhulle tasten sammen med de fire Navigasjonstastene for å få tilgang til bøker som du har organisert i ulike bokhyller. Rett nedenfor Bokhulle tasten finner du **Bokmerke** tasten. Bokmerke tasten brukes for å sette inn bokmerker i boken for fremtidig referanse. Den tredje, og nederste tasten er **Løs Ut** tasten, som brukes for å løse ut en CD fra CD spilleren.

Til høyre for de fire Navigasjons tastene finner du **På/Av** tasten. Den er lett nedsenket for å unngå at du trykker den ved et uhell. På/Av tasten brukes for å slå Stratus på og av.

Nedenfor de fire Navigasjonstastene finner du en gruppe med 4 taster. Tre av dem står ved siden av hverandre langs den nedre delen av spilleren. Dette er, fra venstre mot høyre, **Tilbakespol**, **Spill/Stopp** og **Hurtig Frem**. Til slutt, over Spill/Stopp tasten finner du **Lesetid** knappen. Den er halvmåne formet, og har et oransje LED lys til venstre. Trykk den gjentatte ganger for å velge hvor lenge Stratus skal lese før den slås av automatisk.

På høyre kant av spilleren, nær midten, finner du uttaket for høretelefoner, som også kan brukes for å koble til eksterne høyttalere.

På bakre kant av spilleren, litt til høyre for midten, finner du tilkoblingen for strømledningen. Den brukes for å koble spilleren til strømnettet.

På forkanten av spilleren finner du sporet (åpningen) for innsetting av CD'en.

Sett inn og spill av en ny bok.

Slå på Victor Reader ved å trykk og holde **På/Av** tasten nede. Du får høre et lydsignal og en Velkomst melding.

Sett inn CD'en i sporet foran på spilleren. Trykk CD'en rolig inn, inntil spiller mekanismen overtar og fører CD'en helt inn. Etter noen få sekunder annonserer Victor Reader tittelen på boken og begynne avspillingen.

MERK: Dersom du, vet et uhell, setter inn CD'en opp-ned løser spilleren den automatisk ut etter ca 15 sekunder.

Du kan justere Toneleie, Volum og Hastighet ved å trykke tastene opp eller ned. **Tone, Volum og Hastighet** tastene er plassert øverst på spilleren.

For å flytte raskt frem og tilbake i boken kan du trykke og holde nede **Tilbakespol** og **Hurtig Frem** tastene inntil du kommer til det stedet i boken hvor du ønsker å lese. Slipp opp tasten, og lesingen fortsetter med normal hastighet.

For å ta en pause i avspillingen trykker du ganske enkelt **Spill/Stopp** tasten. For å gjenoppta lesingen der hvor du stoppet trykker du **Spill/Stopp** en gang til. Legg merke til at dersom spilleren ikke er koblet til strømnettet, og ikke har vært aktiv i 30 minutter slås den automatisk av for å spare batterikapasitet.

Når du skal avslutte lesingen slår du ganske enkelt spilleren av ved å trykke **På/Av** tasten inntil du får beskjeden at spilleren slås av. Victor Reader husker hvor du var i boken, og begynner lesingen der hvor du sluttet, neste gang du leser boken.

Neste gang du skal lese den samme boken, slå på Victor Reader ved å trykke og holde nede På/Av tasten inntil du hører lydsignalet og velkomst meldingen. Du vil deretter høre tittelen på boken, et lydsignal, og lesingen fortsetter der hvor du sluttet.

Løs ut en CD

For å løse ut en CD trykker du ganske enkelt **Løs Ut** tasten. Victor Reader gir beskjeden "Løs ut", og etter et par sekunder skyves CD'en rolig ut av sporet ved hjelp av den motoriserte utløsnings mekanismen.

Tasteforklaring Modus

Når det ikke står en CD i spilleren står Stratus automatisk i Tasteforklaring modus. Når en tast trykkes for du opplest en kort forklaring på hvilken funksjon tasten utfører. Dette kan være meget nyttig når du skal lære deg hvordan spilleren fungerer. Dersom det står en CD i spilleren kan du få den samme informasjonen ved først å trykke og holde nede **Informasjon** tasten, plassert i sentrum av de fire Navigasjons tastene. Trykk og hold **Informasjon** tasten nede en gang til for å gå ut av Tasteforklaring modus.

Dette avslutter Komme-i-Gang veiledningen. Avspillingen av Brukerhåndboken starter om et øyeblikk.

Om Victor Reader Stratus4

HumanWare er stolte over å kunne presentere Victor Reader Stratus⁴, den enkle og brukervennlige lydbokspilleren.

Victor Reader Stratus⁴ er utviklet for fritids lesing av bestselgere, romaner og tidsskrifter. Den gjør det enkelt for deg å flytte rundt i bokens struktur og raskt gå til det stedet hvor du ønsker å lese.

Med funksjonene som er enkle å bruke kan du se på bokens innholdsfortegnelse, gå til et kapittel eller gå tilbake til et bokmerke.

Vi ønsker deg mange hyggelige stunder med Victor Reader Stratus⁴.

Om HumanWare

HumanWare (<http://www.humanware.com>) er en global leverandør av hjelpemidler for synshemmede. Humanware utvikler produkter for blinde, svaksynte, eller personer med lesevansker.

©Copyright 2011. Alle rettigheter forbeholdt, HumanWare Canada.

Denne håndboken er beskyttet av copyright tilhørende HumanWare, med alle rettigheter forbeholdt. I henhold til copyright lov kan denne håndboken ikke kopieres, helt eller delvis, uten foregående skriftlig tillatelse fra HumanWare

Innholdsfortegnelse

KOMME I GANG MED VICTOR READER STRATUS4	5
OM VICTOR READER STRATUS4	7
1. OVERSIKT OVER VICTOR READER STRATUS⁴	9
1.1 Utpakking av Spilleren.....	9
1.2 Tastaturdeksel (tilleggsutstyr)	9
1.3 Fysisk beskrivelse av Victor Reader Stratus ⁴	10
Oversiden av Spilleren	10
Venstre side av Spilleren.....	11
Høyre side av Spilleren	11
Fronten av Spilleren	11
Baksiden av Spilleren.....	11
1.4 Lade Batteri	11
1.5 Slå På/Av Victor Reader.....	12
1.6 Sett inn og Løs ut en CD	12
1.7 Tastebeskrivelse modus.....	12
2. NAVIGASJONSFUNKSJONER	13
2.1 Navigasjonstaster	13
2.2 Bokhylle	13
2.3 Tidshopp navigering	13
2.4 Ti sider hopp.....	13
3. AVANSERTE FUNKSJONER	15
3.1 Informasjon Tasten.....	15
Tilgjengelige informasjonselementer.....	15
3.2 Lesetid og Tidsangivelse	15
3.3 Still inn Dato og Tid	15
3.4 Bokmerker	16
Sette inn bokmerker	16
Gå til et bokmerke	16
Slette bokmerker	16
3.5 Angre/Omgjør	16
4. LYTTE TIL EN MUSIKK ELLER MP3 CD	17
4.1 Funksjoner.....	17
5. HVORDAN BYTTE BATTERI	18
5.1 Fjern brukt batteri	18
5.2 Sette inn nytt batteri	18
6. OPPDATERE STRATUS PROGRAMVARE	19
7. FEILSØKING	20
7.1 Boknavigering.....	20
7.2 Batteri og ladning	20
7.3 CD plater	21
7.4 Generelt.....	22
8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER	24

1. Oversikt over Victor Reader Stratus⁴

1.1 Utpakking av Spilleren

Pakken inneholder følgende: En Victor Reader Stratus⁴, et tastaturdeksel (tilleggsutstyr) som kan benyttes for å dekke til Navigasjonstastene, en strømkabel, en plastpose med dokumentasjon og denne CD'en. CD'en inneholder en kort Komme-i-Gang beskrivelse etterfulgt av Brukerhåndboken. Du kan skrive ut Brukerhåndboken og Komme-i-Gang om du har behov for det.

Før du begynner å bruke Victor Reader første gang bør du koble den til strømmettet for å lade batteriet. Du kan bruke spilleren mens batteriet lades.

Hvis noen deler mangler i pakken kan du ta kontakt med:

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

1.2 Tastaturdeksel (tilleggsutstyr)

Spilleren din kan utstyres med et tastaturdeksel som tilleggsutstyr. Dekselet dekker Navigasjonstastene og gjør at de ikke er tilgjengelige, dersom du ikke har behov for å ha tilgang til dem. Skulle du ønske tilgang til tastene kan dekselet fjernes.


Tastaturdekselet er festet med clips i spillerens fire hjørner, og hindrer tilgang til følgende taster: **Bokhylle**, **Bokmerke**, **Navigasjonstastene** og **Informasjon** tasten.

Dersom Tastaturdekselet er montert kan det fjernes på følgende måte:

- Hold spilleren i bærehåndtaket med venstre hånd.
- Bruk høyre hånd, og finn frem til dekselets øvre, høyre hjørne. Clipsen er midt i hjørnet.
- Plasser siden på høyre pekefinger under clipsen.
- Bruk tommelen som vektstang mot siden av spilleren og press med pekefingeren for å løfte clipsen litt ut fra siden på spilleren og opp.
- Bruk den samme metoden for å løfte det nedre, høyre hjørnet på dekselet litt opp
- Med begge hjørnene litt hevet skal du kunne løfte dekselet av. Om nødvendig kan du også løfte det nedre, venstre hjørnet med samme fremgangsmåte.
- Når du ønsker å sette tastaturdekselet tilbake på plass passer du på at dekselet er riktig posisjonert over spilleren, og spesielt at dekselets bærehåndtak er posisjonert over spillerens bærehåndtak.
- Deretter trykker du dekselet rett ned inntil alle fire hjørner klikker på plass.

1.3 Fysisk beskrivelse av Victor Reader Stratus⁴

Oversiden av Spilleren

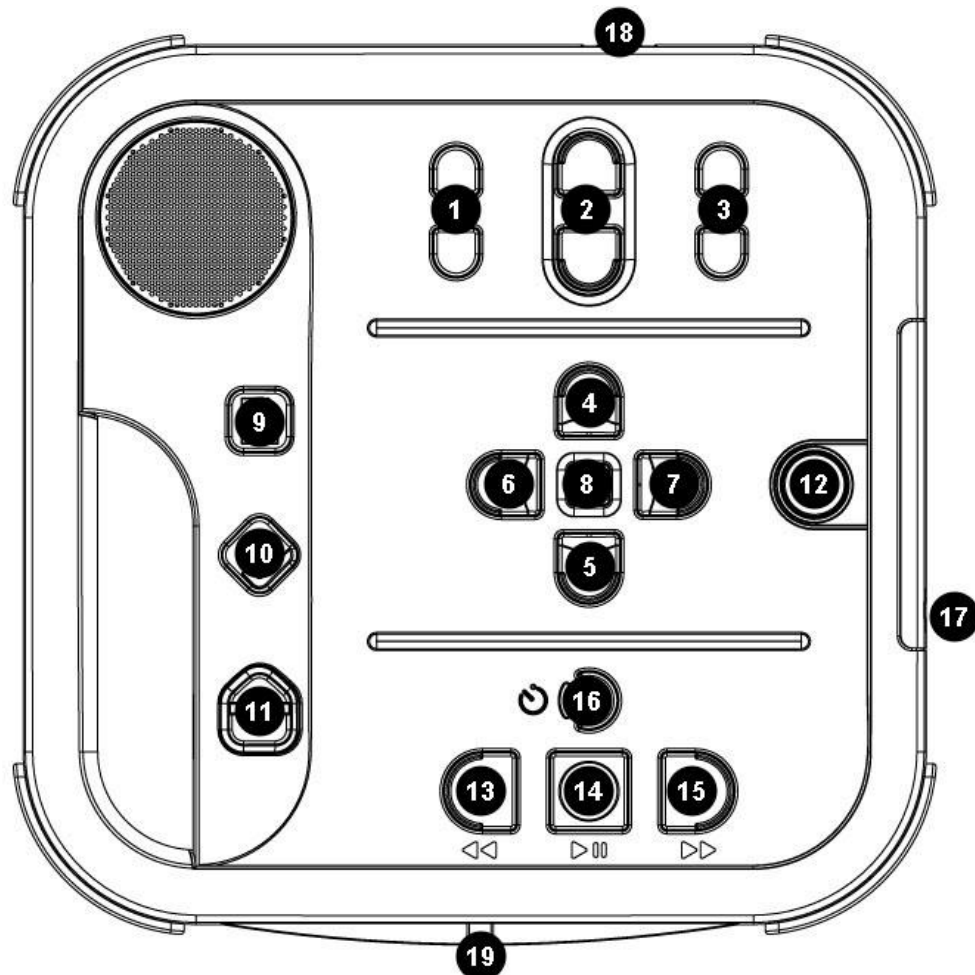

Figur 1: Stratus taster

Stratus taster og funksjoner:

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Toneleie kontroll | 9. Bokhylle | 17. Høretelefon inngang |
| 2. Volum kontroll | 10. Bokmerke | 18. Strømkabel inngang |
| 3. Hastighet kontroll | 11. Løs Ut | 19. CD spor |
| 4. Navigasjon: OPP | 12. På/Av | |
| 5. Navigasjon: NED | 13. Tilbakespol | |
| 6. Navigasjon: VENSTRE | 14. Spill/Stopp | |
| 7. Navigasjon: HØYRE | 15. Hurtig Frem | |
| 8. Informasjon | 16. Lesetid | |

Den innebygde høyttaleren er plassert i øvre venstre hjørne på oversiden.

Øverst midt på oversiden er det tre par med øke/minske taster. Fra venstre mot høyre er disse **Toneleie**, **Volum** og **Hastighet** tastene.

Under **Tone**, **Volum** og **Hastighet** tastene, finner du de fire pil-formede Navigasjonstastene **Opp**, **Ned**, **Tilbake (Venstre)** og **Fram (Høyre)** som lar deg enkelt flytte gjennom strukturen i en bok. Midt mellom disse Navigasjonstastene finner du **Informasjon** tasten. Informasjon tasten forteller deg gjeldende leseposisjon og generell informasjon om boken.

Til venstre for de fire navigasjonstastene, omtrent midt på spilleren er det tre taster til, plassert etter hverandre. Den øverste tasten er **Bokhylle** tasten. Dersom det finnes flere bøker på CD'en kan du bruke **Bokhylle** tasten sammen med høyre/venstre piltastene for å velge bok. Rett under Bokhylle tasten finner du **Bokmerke** tasten. **Bokmerke** tasten brukes for å sette inn et bokmerke et sted i boken du ønsker å komme tilbake til. Trykk **Bokmerke** tasten flere ganger for å velge mellom å: sette inn bokmerke, gå til bokmerke eller slette bokmerker. Den tredje, og nederste tasten er **Løs Ut** tasten. Den brukes for å løse ut en CD fra spilleren.

Til høyre for de fire Navigasjonstastene er **På/Av** tasten. Den er lett nedsenket for å unngå at du trykker den ved en feiltagelse. **På/Av** knappen brukes for å slå Stratus På og Av.

Under de fire Navigasjonstastene finner du en gruppe med fire taster: Tre av dem står ved siden av hverandre nær kanten på spilleren. Disse er, fra venstre til høyre: **Tilbakespol**, **Spill/Stopp** og **Hurtig frem** tastene. Over **Spill/Stopp** tasten finner du **Lesetid** tasten. Den er halvmåneformet, med en LED indikator til venstre. Lesetid tasten brukes for å velge og aktivere Lesetid innstillingen. Trykk på tasten flere ganger for å velge og aktivere ønsket lesetid. Spilleren leser den ønskede tiden, og slår seg deretter av automatisk.

Venstre side av Spilleren

På venstre side av spilleren finner du det innebygde håndtaket og høyttaleren.

Høyre side av Spilleren

På høyre side av spilleren, nær midten, finner du inngangen for høretelefoner, som også kan brukes for å koble til eksterne høyttalere.

Fronten av Spilleren

På fronten av spilleren finner du CD-ROM stasjonen.

Baksiden av Spilleren

På baksiden, ved høyre hjørne finner du inngangen for strømkabelen. Den brukes for å koble spilleren til et strømuttak for å lade batteriet.

1.4 Lade Batteri

Batteriet er sertifisert for omtrent 300 oppladninger. Under normale forhold kan det fullt oppladede batteriet vare i inntil 10 timer med kontinuerlig spilling av DAISY bøker. Imidlertid kan batterivarigheten bli redusert i følgende tilfeller.

- Hvis batteriet lades i mindre enn 4 timer.
- Ved omfattende bruk av boknavigasjon kommandoer.
- Ved spilling av "ikke-DAISY" CD plater, som bruker mer strøm og spiller i omtrent 3 timer på batteri.
- Ved høyt lydnivå eller lesing med høy hastighet.

Batteriet vil automatisk lades opp når spilleren kobles til strømmettet. Spilleren kan brukes mens den lades. For å lade batteriet kobler du ganske enkelt spilleren til strømmettet. Dersom spilleren er slått på når du gjør dette vil du høre et lydsignal som bekrefter at den er koblet til. Du vil høre et nytt lydsignal når spilleren kobles fra. Batteriet blir imidlertid ladet, uavhengig av om spilleren er slått på eller ikke.

For informasjon om hvordan du bytter batteri, se Bytte Batteri kapittelet.

MERKNAD: Når spilleren ikke er koblet til en nettkontakt og er i pausemodus i mer enn 30 minutter, vil den slås av automatisk for å spare batteriet.

1.5 Slå På/Av Victor Reader

For å slå på spillerne, trykk og hold nede **På/Av** tasten. Du får høre en lydsignal og en Velkommen melding.

For å slå av spilleren, trykk og hold nede **På/Av** tasten igjen. Du får høre to lydsignal som indikerer at spilleren slås av.

På/Av tasten oppfører seg på følgende måte:

- Spilleren er slått på. Tasten lyser grønt, uavhengig av om batteriet lades eller ikke.
- Spilleren er slått av, er koblet til strømmettet og batteriet lades. På/Av tasten lyser blekt rødt, og blinker.
- Spilleren er slått av, er koblet til strømmettet og batteriet lades ikke. På/Av tasten lyser blekt rødt, og blinker ikke.
- Spilleren er slått av og er ikke koblet til strømmettet. På/Av tasten lyser ikke.

1.6 Sett inn og Løs ut en CD

Sett inn CD-en i sporet som befinner seg på fronten av spilleren. Trykk så rolig CD-en inn. En motorisert mekanisme vil trekke CD-en inn i stasjonen. Etter noen sekunder vil Victor Reader annonsere boktittelen og etter et lydsignal vil den starte lesing av boken. Hvis du ved et uhell setter inn CD-en opp ned, vil den løses ut i løpet av 15 sekunder uten skade.

For å løse ut en CD, trykk bare **Løs ut** tasten, plassert i nedre venstre hjørne. En motorisert mekanisme vil automatisk løse ut CD-en fra stasjonen.

MERKNAD: **Løs ut** tasten virker bare når Victor Reader er slått på

1.7 Tastebeskrivelse modus


Med *Tastebeskrivelse* egenskapen kan du lære funksjonene knyttet til hver av tastene til Victor Reader. Dette er spesielt nyttig når du lærer hvordan du bruker spilleren.

Hvis det ikke er noen CD i stasjonen: *Tastebeskrivelse modus* aktiveres automatisk. Om det står en CD i spilleren kan du aktivere *Tastebeskrivelse modus* ved å trykke og holde nede Informasjon tasten. Trykk og hold Informasjon tasten nede en gang til for å forlate *Tastebeskrivelse modus*.

Når du er i *Tastebeskrivelse modus*, kan du trykke en vilkårlig tast for å høre dens funksjon.

2. Navigasjonsfunksjoner

2.1 Navigasjonstaster

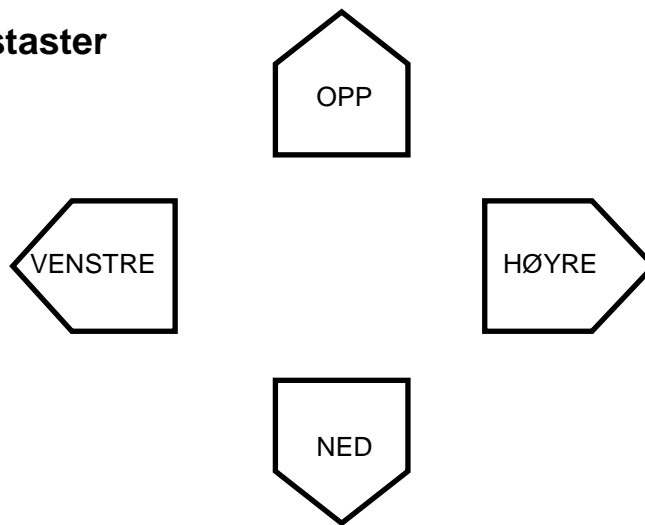

Under **Tone**, **Volum** og **Hastighet** tastene finner du de fire Navigasjonstaster: **Opp**, **Ned**, **Tilbake (Venstre)** og **Fram (Høyre)**. Disse tastene lar deg enkelt flytte fra et bokelement til et annet og raskt gå til den ønskede informasjonen.

Eksempler: flytte til kapittel, inndeling, side, avsnitt, bok eller andre elementer definert av bokens produsent.

Velg først et bokelement (kapittel, side, etc.). Trykk **Opp** eller **Ned** tasten gjentatte ganger inntil du hører det ønskede elementet. Det seneste elementet lest er det som er valgt.

Bruk så **Fram (Høyre)** tasten til å flytte fremover eller **Tilbake (Venstre)** tasten til å flytte bakover fra et tekstelement til et annet inntil du kommer til det ønskede bokelementet. Det seneste elementet lest er det som er valgt. Lesingen av det valgte bokelementet starter

2.2 Bokhylle

Dersom CD'en inneholder flere boktitler, trykk **Bokhylle** tasten for å komme til boklisten. Tastene **Tilbake** og **Fram** lar deg flytte fra tittel til tittel for å velge boken du vil ha. Bekreft valget med **Spill/Stopp** tasten. Victor Reader starter å spille den valgte boken. Legg merke til at bokhylle bare er tilgjengelig hvis det er mer enn en bok på CD skiven.

2.3 Tidshopp navigering

Tidshopp navigasjon kan brukes med **Opp** eller **Ned** tastene.

Trykk **Opp** eller **Ned** tasten for å velge navigasjonsnivå inntil Victor Reader annonserer "Tidshopp" fulgt av *Hoppintervall*.

Trykk **Tilbake** tasten for å flytt bakover eller **Fram** tasten for å flytte fremover dette intervallet.

2.4 Ti sider hopp

Tilbake og **Fram** tastene lar deg flytte i 10 sider hopp for raskt å komme til en bestemt side.

Velg Sidenavigasjon elementet ved å trykk **Opp** eller **Ned** tasten inntil du hører "Side".

Trykk så og hold **Tilbake** eller **Fram** tasten. Du vil nå høre Victor Reader hoppe fremover eller bakover i sprang på 10 sider.

Slipp tasten når du er i nærheten av den ønskede siden, og hopp så fremover én side av gangen ved å trykke **Tilbake** eller **Fram** tasten inntil du kommer til den ønskede siden. Dersom boken ikke gir mulighet til sidenavigering blir navigasjonselementet "Side" ikke annonsert når du trykker **Opp/Ned** tastene.

3. AVANSERTE FUNKSJONER

3.1 Informasjon Tasten

Trykk **Informasjon** tasten for å få beskjed om gjeldende lese posisjon og andre informasjons elementer.

Tilgjengelige informasjonselementer

- *Boktittel*
- *Aktuelt sidenummer*
- *Avspilt tid og gjenværende spilletid*
- *Antall bøker på CD skiven*
- *Antall sider i den aktuelle boken (hvis tilgjengelig)*
- *Total spilletid for boken*

Hvis du trykker og holder **Informasjon** tasten, gis mer informasjon om spillerspråk, om spilleren brukes med batteri eller på strømmettet, aktuelt batterinivå, programvareversjon, modell, antall brukerautorisasjon nøkler og serienummer.

Legg merke til at serienummeret også kan finnes i batteri rommet.

3.2 Lesetid og Tidsangivelse

Lesetid tasten gir deg mulighet til å få vite tid og dato, samt angi ønsket Lesetid.

Trykk tasten en gang for å høre tiden, etterfulgt av ukedag og dato.

Lesetid funksjonen gjør det mulig å sette Stratus til å lese en viss tid før den slår seg av automatisk. Tiden kan settes til 15, 30, 45 eller 60 minutter, eller slås av. Trykk **Lesetid** tasten gjentatte ganger for å velge den ønskede tiden. For å deaktivere lesetid funksjonen trykker du tasten gjentatte ganger inntil du kommer til Av alternativet.

Når Lesetid er aktivert lyser et oransje lys til venstre for Lesetid tasten. Ett minutt før spilleren begynner lyset å blinke, og du vil høre en melding som sier at det gjenstår 1 minutt av lesetiden. Når slutten av lesetiden er nådd gir spilleren beskjed om at den slås av, og gjør det uten å avgi noe lydssignal.

3.3 Still inn Dato og Tid

For å stille inn Dato og Tid trykker og holder du **Lesetid** tasten nede. Bruk **Opp** og **Ned** piltastene for å navigere i menyen. Elementene i Dato og Tid menyen er som følger: Still inn tid, Still inn dato, og Still inn Avansert tid. Når du har flyttet til ønsket element, trykk **Høyre** piltast for å gå inn i undermenyen. Denne menyen vil ha ulike undermeny elementer. Bruk **Høyre** og **Venstre** piltaster for å navigere fra en undermeny til en annen. **Opp** og **Ned** piltastene brukes for å gå igjennom de ulike alternative innstillingene for hvert undermeny element. Bruk **Høyre** piltast for å bekrefte valget ditt og gå til neste undermeny. Når du har nådd den siste undermenyen trykker du **Høyre** piltast for å bekrefte innstillingene og ta deg tilbake til hovedmenyen. Trykk deretter **Lesetid** for å gå ut av menyen. Du kan når som helst forlate menyen uten å lagre endringene ved å trykke en annen tast.

Liste over menyer og undermenyer:

- Still inn Tid: Time, Minutt
- Still inn Dato: År, Måned, Dag

- Still inn Avansert Tid: 12/24 timer format, Sommertid

Sommertid innstillingen er en rask måte å justere klokken en time frem eller tilbake. Du kan manuelt velge Standard tid eller Sommertid i Avansert tid undermenyen.

Merk: Denne innstillingen betyr ikke at spilleren automatisk skifter tid på angitte datoer 2 ganger i året.

Eksempel:

Dersom du ønsker å endre måned, gjør følgende:

- Trykk og hold **Lesetid** tasten inntil du hører menyen bli annonsert.
- Trykk **Ned** piltasten en gang for å komme til Still inn Dato
- Trykk den **Høyre** piltasten to ganger for å komme til Måned undermenyen
- Trykk **Opp** eller **Ned** piltastene flere ganger for å komme til riktig måned
- Trykk **Høyre** piltast for å flytte til neste undermeny (Dag)
- Dersom du ikke ønsker å endre datoen trykker du **Høyre** piltast for å gå ut av Still inn Dato menyen, hvilket også lagrer de innstillingene du har gjort.

3.4 Bokmerker

Bokmerke tasten markerer steder i boken slik at du kan gå tilbake til dem senere.

Sette inn bokmerker

Trykk og hold **Bokmerke** tasten for å sette inn et bokmerke. Et nummer vil tilordnes hvert bokmerke. En melding vil bekrefte bokmerket og fortelle deg det nummeret som er tilordnet.

Gå til et bokmerke

Trykk og slipp **Bokmerke** tasten. Når du hører meldingen "Bokmerkeliste", trykk **Tilbake** eller **Fram** tastene for å velge bokmerket som ønskes, og trykk så **Spill/Stopp** for å komme til det valgte bokmerket. Du får høre bokmerkenummeret, og Victor Reader starter å spille.

MERKNAD: *Bokmerkelisten inneholder alltid bokmerker for start og slutt på bok. Bokmerkene er sortert etter posisjon i boken og ikke etter bokmerkenummer.*

Slette bokmerker

Trykk **Bokmerke** tasten to ganger for å slette alle bokmerkene i den aktuelle boken. Spilleren vil be deg om å bekrefte slettingen. Trykk Spill/Stopp for å bekrefte. Trykk en vilkårlig annen tast for å avbryte.

MERKNAD: *Bokmerker og aktuell posisjon lagres alltid separat for hver bok.*

3.5 Angre/Omgjør

Angre funksjonen lar deg omgjøre et uønsket tastetrykk på Venstre eller Høyre navigasjonstastene. For eksempel, dersom du har trykket Høyre tast for å gå til neste bokelement kan du trykke Venstre piltast for å omgjøre dette og gå tilbake til hvor du var. På samme måte kan du trykke Høyre piltast for å oppheve et trykk på Venstre piltast.

MERK: For å oppheve et uønsket tastetrykk må du trykke den motsatte tasten inne 10 sekunder.

4. Lytte til en musikk eller MP3 CD

Victor Reader er ikke bare en talende bokleser. Du kan også spille standard musikk CD-er og MP3-CD-er, noe som lar deg lytte til din favorittmusikk eller kommersielle MP3 bøker.

MERKNAD: Mapper og Filer brukes bare for MP3 CD skiver, når man spiller en musikk CD er bare spornavigasjon mulig.

4.1 Funksjoner

Navigasjon: *Tilbake* og *Fram* pil brukes til å bytte til forrige eller neste fil i samme mappe. Når den aktuelle filen er den første eller siste filen i en mappe, vil *Tilbake / Fram* pil flytte til siste eller første fil i den forrige eller neste mappen henholdsvis.

Avspilling: Avspilling er kontinuerlig; ved slutten av den aktuelle filen bytter den til neste fil og stopper ved slutten av den siste filen på fillisten.

Informasjon tasten gir direkte tilgang til forskjellig informasjon som følgende:

- *Antall filer og mapper (MP3 CD)*
- *Antall spor (hvis musikk)*
- *Total spilletid*
- *Avspilt tid*
- *Gjenværende avspillingstid*
- *Antall bokmerker*
- *Batteri eller strømtilkobling bruk*

5. Hvordan bytte batteri

Kontakt Cantec AS for å få erstatningsbatterier.

5.1 Fjern brukt batteri

Plasser Victor Reader foran deg.

Snu Victor Reader opp ned slik at baksiden vender mot deg. Spillerhåndtaket skal være lengst fra deg.

Finn dekslet over batteriskuffen. Du finner det i nærheten av spillerhåndtaket. Det er to skyveclips med tre taktile merker. Batteridekselet er plassert like under disse skyveclipsene. For å åpne batteridekselet trykker du samtidig de to skyve clipsene fra hverandre med tomlene. Batteridekselet skal da sprette opp, slik at du kan fjerne batteriet.

5.2 Sette inn nytt batteri

Victor Reader batterier er laget for å unngå feil, noe som betyr at det bare kan settes inn en vei.

For å sette det riktig inn i skuffen plasser først batteriet flatt foran deg.

Batteriet er rektangulært. En av de to store flatene har en merkelapp. Dette er undersiden av batteriet. To av de fire kantene på batteriet er helt flate. De to andre har koblingspunkter. En har et enkelt punkt i midten, mens den motsatte har et koblingspunkt i midten, og to mindre på hver side.

Når du skal installere batteriet setter du kanten med de tre punktene inn i de tilsvarende åpningene og trykker batteriet ned for å låse det på plass.

Legg merke til at et nytt batteri normalt er ca 50% full-ladet.

6. Oppdatere Stratus Programvare

Cantec AS leverer fra tid til annen oppgraderinger til Stratus programvare. Oppgraderingene leveres på en CD som du kan bestille gratis fra Cantec AS.

For å oppgradere spilleren gjør du følgende:

- Koble Stratus til strømmettet
- Slå spilleren på, og sett inn oppgraderings CD'en
- Oppgraderingen starter automatisk, og gir beskjed om versjonsnummeret på den nye programvaren. Ca hvert tiende sekund høres en fremdrift melding.
- Etter at oppgraderingen er ferdig slår spilleren seg av automatisk.
- Neste gang du slår spilleren på løses CD'en ut automatisk.

7. Feilsøking

7.1 Boknavigering

1. Hvorfor annonserer ikke alltid Victor Reader samme DAISY nivåer når jeg trykker Opp og Ned tastene?
Opp og Ned tastene går gjennom DAISY navigasjonsnivåene gitt av bokprodusenten. Ikke alle DAISY bøker har samme navigasjonsnivåer. For eksempel kan bokprodusenten bare ha satt inn nivå 1 (ofte brukt for kapitler) merker i boken. I dette tilfellet vil Opp og Ned tastene bare annonsere "nivå 1" og "frase". Et frasenivå er alltid tatt med, selv om frasene ikke er helt likt definert i alle bøker. Victor Reader kan bare navigere på nivåer gitt av bokutgiveren. Noen ganger kan en frase være definert som en enkelt setning, mens andre bruker et bestemt tidshopp. Andre kan ha konvertert bøker fra gamle kassetter, og har definert en frase som det som tidligere var en side på en kassett. For bøker med få eller ingen DAISY navigasjonsmerker må du navigere med **Hurtig frem** og **Tilbakespol** tastene. **Tilbakespol** tasten er til venstre for **Spill/Stopp** tasten og **Hurtig frem** tasten er til høyre for Spill/Stopp tasten.
2. Hvordan kan jeg vite hvilke DAISY navigasjonsnivåer som er tilgjengelige i min bok?
Victor Reader **Opp** og **Ned** tastene går gjennom de tilgjengelige navigasjonsnivåene i boken. Mange bokutgivere tar med et avsnitt ved begynnelsen av boken som beskriver hvilke DAISY nivåer det er i boken. Undersøk hos din bokutgiver hvis du ikke er sikker på navigasjonsnivåene i boken.
3. Hvordan hopper jeg raskt til starten eller slutten av en bok?
Victor Reader har automatiske bokmerker for starten og slutten av boken. Trykk **Bokmerke** tasten inntil du hører Victor Reader annonsere, "Bokmerkeliste". Trykk så **Venstre** piltast inntil du hører, "start på bok". Starten på boken er alltid til venstre for første bokmerke angitt av brukeren. På samme måte kan du trykke **Høyre** pil når du er i bokmerkelisten inntil du hører "slutt på bok". Slutten på boken er alltid til høyre for siste bokmerke angitt av brukeren. Hvis du ikke har satt noen bokmerker, trenger du bare trykke venstre pil en gang på bokmerkelisten for å komme til starten av boken eller trykke høyre pil en gang for å komme til slutten.

7.2 Batteri og ladning

1. Kan jeg ødelegge batteriet hvis jeg lar spilleren være koblet til strømmettet over lang tid?
Nei. Imidlertid anbefaler vi at du kobler fra spilleren dersom du skal være bortreist i lengre tid. Dette for å unngå skader dersom strømmen skulle bli brutt mens du er bortreist.
2. Kan jeg bytte batteri?
Ja. Erstatningsbatterier fås fra Cantec AS.
3. Hvor mange ganger kan jeg lade batteriet før det er nødvendig å skifte det?
Normalt vil batteriet tåle 300 ladninger. Deretter kan batteriet fortsatt lades, men brukstiden vil gradvis bli redusert, og det vil etter hvert være nødvendig å bytte batteri.
4. Hvilke forholdsregler skal jeg ta dersom jeg ikke regner med å bruke spilleren for en lengre periode?
Dersom du ikke skal bruke spilleren for en periode som overstiger 3 måneder anbefaler vi at du tar ut batteriet og lager det separate. Temperaturen kan være mellom -20 og +35 grader, og luftfuktigheten mellom 5 og 90%.

7.3 CD plater

1. Hva bør jeg gjøre hvis CD skiven sitter fast og ikke vil løses ut?
Forsøk først å slå av Victor Reader og så slå den på igjen og så trykke **Løs ut**. Hvis **På/Av** tasten ikke ser ut til å virke (ingen pipelyd når du trykker den), så hold **På/Av** tasten nede i 10 sekunder og slipp den så. Hold så nede **Løs ut** tasten mens du igjen trykker **På/Av** tasten. Fortsett å holde **Løs ut** tasten inntil du hører: "Velkommen til Victor". Victor Reader skulle så løse ut CD-en.
2. Kan jeg skade Victor Reader hvis jeg setter inn CD skiven opp ned?
Nei. Victor Reader vil bare løse ut CD skiven.
3. Hvorfor lager Victor Reader hvine- eller skrapelyder med noen minutters mellomrom?
Det er den normale lyden til CD-ROM stasjonen når spilleren leser informasjon fra CD-en. For DAISY CD bøker vil den slutte å rotere når CD-en er lest for å spare strøm og den blir stille i flere minutter inntil den skiven må leses igjen. Trykk på navigasjonstastene eller hopp til et bokmerke vil også få CD-en til å rotere for å flytte til den nye posisjonen.
4. Hva bør jeg gjøre hvis CD skiven hopper eller stopper spillingen.
CD-er med dårlig kvalitet eller med fingermerker eller skraper vil ofte ikke spilles av korrekt eller ikke i det hele tatt. Løs ut CD-en. Prøv å rense den med en myk klut uten løse fibere eller CD rensklut som kan kjøpes i de fleste butikker som selger CD-er. Ikke bruk papirhåndklær eller papirlommetørklær. Rengjør overflaten av CD-en fra midten og utover til kanten i rettlinjede bevegelser. Bruk ikke sirkulære bevegelser. Hvis CD-en fremdeles ikke vil avspilles, må den undersøkes for skraper. Skrapede CD-er må sendes tilbake for bytting.
5. Trenger jeg å rengjøre CD stasjonen eller laser leselinsen?
Nei. Den typen stasjon som brukes i Victor spillere trenger ikke rengjøring.
6. Kan jeg sette på en etikett i svartskrift eller punkt på CD-en?
Nei. Etiketten kan påvirke balansen til CD-en når den roterer med høy hastighet. Hvis etiketten skulle i tillegg skulle løsne inne i spilleren, vil den høyst sannsynlig skade CD-ROM stasjonen. Hvis du får en CD med en punktetikett eller en annen etikett, må du fjerne den.
7. Hvorfor hører jeg noen ganger meldingen: "Vennligst vent", når jeg trykker en tast mens det er en CD i spilleren?
Dette kan skje hvis du trykker taster for raskt etter å ha satt inn CD-en eller slått på spilleren. Victor Reader trenger litt tid til å lese skiven og laste DAISY navigasjonsinformasjon. Etter å ha slått på spilleren eller satt inn en CD, må du vente til Victor Reader annonserer boktittelen før du trykker noen taster.
8. Hva betyr meldingen: "Ingen bok på CD platen"?
Det er meldingen Victor Reader gir hvis den ikke gjenkjenner CD typen. Victor Reader kan bare spille DAISY, MP3 eller lyd CD-er.
9. Hva betyr meldingen: "Lydformat ikke støttet"?
CD-en har lydfiler som Victor Reader gjenkjenner, men filene er formatert slik at den er inkompatibel med Victor Reader programvaren. Du bør henvende deg til HumanWare teknisk støtte avdeling.
10. Kan jeg skade Victor Reader ved å spille en CD med riper?
Nei. CD leselinsen kommer ikke i kontakt med CD overflaten, så den vil ikke skades hvis CD-en har riper. Den vil heller ikke utsettes for slitasje ved gjentatt avspilling som for kassetspillere.

7.4 Generelt

1. Hva skal jeg gjøre hvis **På/Av** tasten ikke virker?
Hvis du ikke kan høre noe lydssignal når du trykker **På/Av** knappen, så sørg først for at spilleren er koblet til nettkontakten. Hvis **På/Av** tasten fremdeles ikke virker, så trykk og hold den i 10 sekunder. Dette vil resette spilleren. Trykk den så igjen, og Victor Reader skulle nå pipe og starte normalt.
2. Kan den interne Victor Reader programvaren oppdateres?
Ja. Når Cantec AS oppgraderer Victor Reader programvare, kan kundene installere ny programvare ved bare å sette inn en spesiell oppgradering CD i spilleren, som automatisk oppdaterer den interne programvaren. Oppgradering CD'en fås gratis fra Cantec AS.
3. Bør jeg slette bokmerker for å spare minne?
Nei. Victor Reader kan lagre over 1500 bokmerker spredt over mange bøker. Selv om du overskrider dette store antallet vil Victor erstatte bokmerker som sjelden blir brukt. Du trenger altså bare å slette bokmerker hvis du ikke vil ha dem.

8. Tekniske Spesifikasjoner

- Mål, uten tastaturdeksel: 22. X 21.6 X 4.8. cm
- Mål med tastaturdeksel: 22.8 X 22.2 X 5.1 cm
- Vekt: 0.95 kg, med batteri
- DAISY Format: DAISY 2.0 and 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002 and Z39.86 2005
- Batteri type: Oppladbart Li-Polymer batteri. 8.4 volts 1650 mAh
- Ladetid: 4 timer
- Brukstid: 10 kontinuerlig avspilling av DAISY MP3 bok
- Strømforsyning: Den medfølgende strømforsyningen er beregnet på bruk i Norge.
Kontakt Cantec AS om strømforsyninger for andre land.
- Kodingsalgoritmer: AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
- Strømkontakt 2.5 mm (interior)/ 5.5 mm (exterior)
- Høretelefon kontakt 3.5 mm

Utstyr klassifisering (IEC 601-1)

- Type of Protection: Class 1
- Applied Parts: None
- Sterilization Method: Not intended for sterilization
- Enclosure Degree of Protection: IP20
- The equipment is not AP or APG category
- Mode of Operation: Continuous

Miljøkrav

- Bruks temperatur 10 til 40° C
- Transport og Lagrings temperatur -20 til 60° C
- Bruks Luftfuktighet 20% til 80% (RH)
- Transport & Lagring Luftfuktighet 10% til 95% (RH)
- Bruks Høyde over Havet -200 til 2000 m
- Transport & Lagring Høyde over Havet -200 til 12 000 m
- Transport & Lagring Barometrisk trykk 70-103 kPa

For mer informasjon, kontakt:

Cantec AS

Postadresse:

Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

