

- helping people

Hurtigmanual




Cantec AS

Postadresse: Postboks 626, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no www.cantec.no

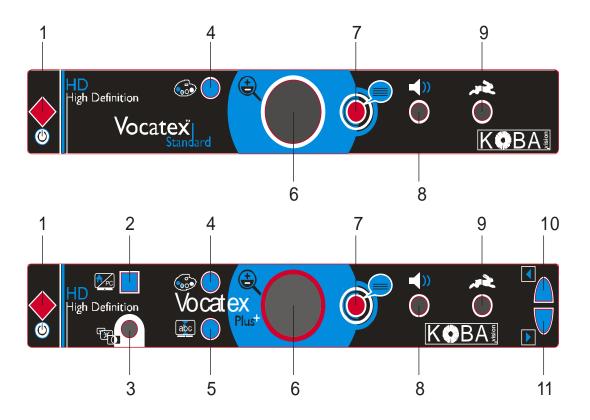

1	PÅ/ AV	Trykk for å starte maskinen. Hold inne 2 sekunder for å slå av
2(x)	Bildebytte	Kan skifte mellom Pc og VocaTex forstørrerbilde. Kun Plus versjon
3(x)	Lysskarphet	Stille inn lys/ mørk skjerm. Kun Plus versjon
4	Kontrastfarger	Skifte mellom kontrastfarger og modus negativ og positiv og
		kolonnesikter.
5(x)	Kolonnesikter	Hjelper deg å sikte midt på den kolonnen som ønskes opplest. Kun Plus
		versjon.
6	Zoom inn/ ut	Vri for ønsket forstørrelse. Trykk for oversiktsbilde
7	Høylesningsknapp	Trykk for høytopplesning når valgt tekst er funnet. Trykk igjen for stopp
8	Volum	Vri for ønsket volum. Trykk og vri for valg i språkmeny.
9	Hastighet	Vri for ønsket hastighet
10	Forrige ord/Linje	Trykk kort for forrige ord opplest. Hold inne 2 sek. for forrige setning.
11	Neste ord/Linje	Trykk kort for neste ord opplest. Hold inne 2 sek for neste setning