

LAK 821 HF Stemmestyrte sender/bryter – Knop

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

GEWA

- helping people

LAK 821 HF Stemmestyrte sender/bryter – Knop



LAK 821 HF Stemmestyrte sender/bryter:
MI 821 Ekstern mikrofon – Knop:

HMS art. nr.: 135562
HMS art. nr.: 136042

Best. nr.: 2223466
Best. nr.: 2223467

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Betjening og innstilling

LAK821HF kan innstilles til å være superfølsom med øyeblikkelig alarm.

LAK 821HF er en lydstyrt bryter beregnet på å hjelpe personer til å sende et signal eller en alarm kun ved hjelp av stemme/lyd. LAK 821 HF overfører signalet trådløst ved hjelp av radiosignaler eller trådbundet via reléutgang til eksisterende varslingsanlegg.

Lyden registreres av en innebygd mikrofon (1). (Se foto på forsiden.) Det kan også tilkobles en ekstern mikrofon (9). På nivåreguleringsknapp (5) innstilles følsomheten. Dreiet helt til venstre er følsomheten minimum, dreiet helt til høyre størst følsomhet. Innstilling skjer ved justering av lydstyrke (5) og tidsforsinkelse (2). På knapp (2) innstiller man forsinkelsen. Forsinkelsen er den tiden man ønsker, at lydnivået som man har innstilt på knappen (5), skal være før der sendes alarm. Dette for å forhindre mange feilalarmer på grunn av støy i omgivelsene.

Tiden kan stilles inn fra 0-7 sekunder. Reset (4) brukes til å nullstille bryteren under innstilling eller etter utløst alarm.

LAK 821 HF ”resettes” automatisk etter ca. 90 sekunder.

Hver gang det avgis en alarm, stenges enheten i 90 sekunder for ytterligere meldinger. Dette sikrer at andre alarm-enheter kan komme igjennom. Enheten kan etter alarm resettes ved å trykke på reset-knappen (4).

NB: Er det nødvendig, kan denne tiden reduseres til 2-3 sekunder.

Sensor lampe (6) viser lydfølsomhet. Når lampen lyser fast, går tiden, og etter at innstilt tid er utløpt, sendes alarm. Sensorlampe (3) vil da lyse.

Trådløs overføring

LAK 821 har en innebygd radiosender som har en rekkevidde på opptil 50-75 meter. LAK 821 kan sende til nedenforstående mottakere:

- RX-2000 Mottaker – Knop: Art. nr.: 2223232
- RX-2001 m/reléutgang – Knop: Art. nr.: 2223235
- RX 300 Mottaker – Knop: Art. nr.: 2223486

Se separat bruksanvisning for respektive mottakere.

Test alltid rekkevidden! Bruk Repeater ved behov. Trådløs overføring kan rammes av forstyrrelser. Test derfor regelmessig alle deler i systemet; alarmgivere, sentral, mottakere osv.

Koding av sender

* LAK-821HF åpnes, så man kan komme til sender-printet.

* På den 8 polete dipswitch stilles koden for systemet.

* På den 4 poleet dipswitch stilles ID-nummeret, når senderen brukes som 12 bit sender.
Hvis alle 4 settes på off, sender den med powercode.



1 Lydsensor indbygget.

2 Tidsforsinkelse.

3 Alarmlampe.

4 Reset knap.

5 Følsomhedsregulering.

6 Sensor lampe.

7 Power strømfors. (St762-B) incl.

8 Relæudgang med sluttefunktion

9 Extern mikrofon (MI821)

HF LAK-821HF-P har indbygget UHF sender til trådløs overførsel af alarm.

Tekniske data

Rekkevidde: Ca. 50 meter
 Strømforsyning: Adapter 12V AC
 Frekvens: 433.92 MHz

