

Sengevakt SV-4080 – Gewa

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

GEWA

- helping people

Sengevakt SV-4080 – Gewa



Gewa sengevakt SV-4080 m/ledning:
Timer m/puls, utenpåliggende:

HMS art. nr.: 020751
HMS art. nr.: 136027

Best. nr.: 2226241
Best. nr.: 2226240

INNHold

Sengevakt SV-4080 – Gewa	1
Plassering av sengevakt i seng	2
Egenskaper	2
Sengevakt med ledning	2
Sengevakt med tidsforsinkelse	2
Rengjøring	2

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Plassering av sengevakt i seng

Sengevakten plasseres under madrassen på tvers og midt i sengen. Om man ønsker alarm allerede når brukeren setter seg opp, må sengevakten plasseres under setedelen. Sengevakten må ligge på et plant underlag.

Egenskaper

Gewa sengevakt SV-4080 er en helstøpt sengevakt støpt i kunststoff. Den leveres i 2 forskjellige utgaver:

- Bare sengevakt med ledning (omtalt nedenfor).
- Sengevakt med strømforsyning og tidsforsinkelse (omtalt nedenfor).

Sengevakt med ledning

Denne sengevakten leveres kun med ledning og modulærkontakt. Når noen ligger i sengen, er det en sluttekontakt mellom pinne 4 og 5 på modulærkontakten. Når brukeren reiser seg, brytes denne forbindelsen. Denne varianten benyttes som signalgiver til EIB systemer eller som komponenter i alarmsystemer og trenger strømforsyning fra disse systemene.

Sengevakt med tidsforsinkelse

Ofte vil man ha en tidsforsinkelse som gjør sengevakten mindre følsom. Man ønsker ikke alarm om brukeren snur seg i sengen, hoster eller lignende. Ofte ønsker man også at brukeren skal ha mulighet til å gå på toalettet inntil 10 minutter (innstilles på potensiometer) før det blir gitt alarm. Elektronikkdelen festes på vegg og trenger strømforsyning 12-24VDC.

Rengjøring

Sengevakten kan rengjøres med fuktig klut og vaskemiddel.