

## Bruker- og vedlikeholdsanvisning

# RX-300 mottaker – Knop



RX-300 mottaker – Knop:

Art. nr.: 2223486

### INNHOOLD

RX-300 mottaker – Knop .....	1
Betjening .....	2
Skru på mottakeren .....	2
Minne i mottakeren.....	2
Kanaler.....	2
Lading av batteri.....	2
Battorialarm .....	2
Battorialarm fra sender (gjelder kun i forbindelse med powercode).....	2
Programmering/sletting.....	3
Programmering av en enkel kanal .....	3
Sletting av en kanal .....	3
Slett alt .....	3
Tekniske data RX-300 .....	4
Følgende av våre produkter kan brukes sammen med Micropager:.....	4

### GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)  
Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## **Betjening**

Betjeningen skjer med bryteren på toppen av mottakeren. Bryteren skyves til ON for å skru på mottakeren og OFF for å skru av mottakeren. I midten gir mottakeren lys, og til venstre vibrasjon.

## **Skru på mottakeren**

Still bryteren på ON. Mottakeren vil da lage en pipelyd. **Mottakeren er nå klar til bruk.**

## **Minne i mottakeren**

Minne i mottakeren husker de siste 8 alarmene. Trykk på ON/OFF knappen for å se den siste alarmen. Hold knappen nede i 2 sekunder for å se den forrige alarmen. Trykk igjen for å se alarmen som var før denne osv. Når det ikke er flere alarmer, stopper visningen. Minnet tømmes hvis mottakeren skrues av!

## **Kanaler**

Mottakeren har totalt 99 kanaler

## **Lading av batteri**

For å lade batteriene, må mottakeren være slått på og laderen montert i DC-pluggen. Etter et par sekunder vil en prikk lyse i displayet. Ved helt utladet batteri vil mottakeren pipe et par ganger ved lading.

Når laderen er montert i DC-pluggen, vil vibratoren ikke være aktivert, men bare en blinkende prikk vil vise at det har vært en alarm.

Med ON/OFF-knappen i midtre stilling, vil mottakeren fungere med lyd ved alarm. Oppladingen vil være ferdig etter ca. 6 timer.

## **Batterialarm**

Hver gang man har mottatt en alarm så sjekkes batteriet. Ved lav batterispenning viser displayet vekselvis bA (battery) / LO (low) mens den piper.

## **Batterialarm fra sender (gjelder kun i forbindelse med powercode)**

Ved lav batterispenning i sender med powercode, vises nummeret og Lo (low) vekselvis mens den piper.

## Programmering/sletting

1. Trykk programmeringsknappen inn i mer enn 2 sekunder.
2. Displayet viser små "[ ]" = programmering av en enkelt kanal.
3. Trykk programmeringsknappen en gang til.
4. Displayet viser små blinkende "[ ]" = sletting av en enkelt kanal.
5. Trykk programmeringsknappen en gang til.
6. Displayet viser store "[ ]" = programmering av en gruppe på 15 sendere.
7. Trykk programmeringsknappen en gang til.
8. Displayet viser store blinkende "[ ]" = sletting av en gruppe på 15 sendere.
9. Trykk programmeringsknappen en gang til og programmeringen avsluttes.

Hvis det ikke gjøres noe valg innen 10 sekunder avsluttes programmeringen.

## Programmering av en enkel kanal

1. Displayet viser små "[ ]".
2. Bruk reset-knappen for å velge den kanalen som skal programmeres.  
Tips: Hold knappen inne og mottakeren blir raskt gjennom kanalene.
3. \*Trykk en gang på programmeringsknappen for å motta senderkoden som skal lagres.
4. Displayet viser blinkende "--".
5. Aktiver den ønskede sender. Det skal gjøres innen 5 sekunder ellers avsluttes programmeringen.
6. Hvis mottakeren piper to ganger, så er koden lagret. Hvis mottakeren gir fra seg et langt pip, så er det allerede lagret en kode på det nummeret og displayet viser kort hvor det er lagret.

## Sletting av en kanal

1. Displayet viser små blinkende "[ ]".
2. Bruk reset-knappen til å velge den kanalen som skal slettes.  
Tips: Hold knappen inne og mottakeren blir raskt gjennom kanalene.
3. Hold programmeringsknappen inne i 2 sekunder for å slette den valgte kanalen.
4. Hvis mottakeren piper to ganger, er koden slettet. Hvis den gir fra seg et langt pip, er koden allerede slettet.

## Slett alt

1. Slå av mottakeren.
2. Trykk på reset + programmeringsknappen og hold dem inne.
3. Slå på mottakeren mens knappene holdes inne i ytterligere 10 sekunder.
4. Når mottakeren gir fra seg et dobbelt pip, slippes knappene.
5. Displayet viser "[ ]".
6. Hvis en sender (12 bit) aktiveres innen 2 sekunder, vil gruppe 1 bli programmert. Ellers slås mottakeren av uprogrammert.

## Tekniske data RX-300

Frekvens:	433.92MHz
LED display:	0-99
Alarmtone:	2700 Hz
Alarm for utskiftning av batterier:	BA-LO i display + tone
Driftsspenning:	3,3 – 2,5 V
Strømforbruk standby:	0,4 mA
Strømforbruk ved beep:	15 mA
Mål:	b=47 mm, h=85 mm, d= 15 mm u/clips
Vekt:	65 gram
Oppladningstid	ca. 6 timer

### Følgende av våre produkter kan brukes sammen med RX-300:

- Epilepsialarm
- Dementsalarm
- Lydaktivert alarm/Luftbryter
- Sengelarm/Døralarm
- Tråkkematter/Sladrematter
- Smykkesendere/Håndsendere
- Alarm mellom personalet (Personalalarm)
- Personalarm/trygghetsalarm
- Alle sendere.